

**Observação:** Devido a melhoria contínua de nossos produtos, a QUARK se reserva ao direito de alterar seus produtos sem incorrer em obrigação alguma de aviso prévio ou atualização em produtos já fabricados.

## Manual de Operação

Versão 1.7

# ELETRODO UROGINECOLÓGICO

Acessório de uso exclusivo para a família dos  
Equipamentos Dualpex 961 (Registro ANVISA nº 80079190022)  
e PerinaStim (Registro ANVISA nº 80079190021)

Fabricante:

**QUARK Produtos Médicos**

Razão Social: André Luis de Toledo Mendes

CGC 71.769.673/0001-59

Indústria Brasileira

Rua do Rosário, 1776 Piracicaba - SP CEP 13 400 186

E-mail: [quark@quarkmedical.com.br](mailto:quark@quarkmedical.com.br) FONE (19)2105-2800

Número ANVISA: 800.791-9

## INTRODUÇÃO

Os eletrodos para tratamento uroginecológico foram desenvolvidos dentro de rigorosos padrões de qualidade, tendo em vista também, a preocupação em proporcionar ao paciente, o mínimo de desconforto com o máximo de eficácia no tratamento.

## INDICAÇÃO

Indicado para o tratamento de períneos dolorosos do pós partum ou pós-operatório, instabilidades vesicais, incontinências sobre imperiosidade, incontinência urinárias de esforço e prolapso.


- **Eletrodo Anal:** Indicado para utilização em pacientes virgens (mulheres) ou do sexo masculino.


- **Eletrodo Vaginal:** Indicado para utilização em pacientes do sexo feminino

Para utilização do Eletrodo Anal, só poderá ser operado o Canal 01 (branco); para a utilização do Eletrodo Vaginal pode-se operar o Canal 01 (branco) ou Canal 02 (cinza) individualmente, ou mesmo ambos os Canais.

**IMPORTANTE: A posição em que se conecta os cabos dos Eletrodos, não influi no seu controle ou seja:**

**Canal 01 = Controle Branco**  
**Canal 02 = Controle Cinza**

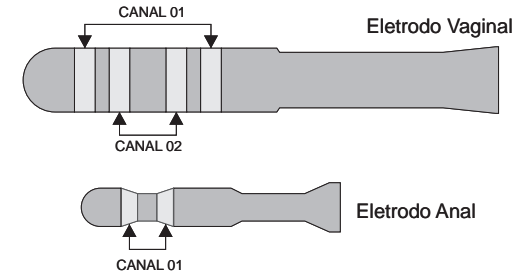

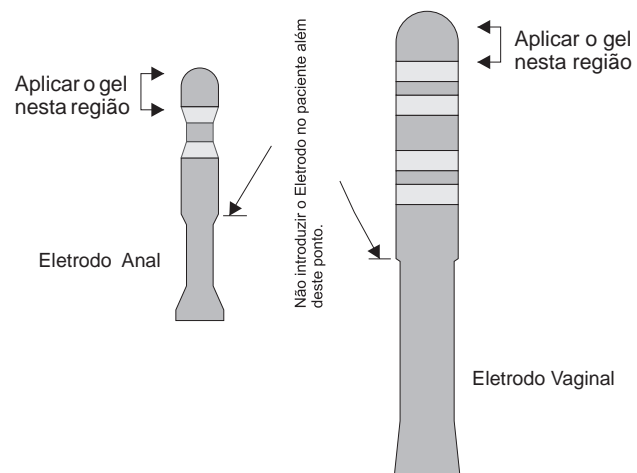

Durante a terapia o Fisioterapeuta deve segurar o Eletrodo introduzido no paciente.

**Atenção:** A utilização dos eletrodos é exclusiva para o tratamento uroginecológico.

### **RECOMENDAÇÕES**

Recomenda-se o uso individual deste produto.

O Eletrodo Anal e/ou Eletrodo Vaginal são partes integrantes dos equipamentos DualPex 961 URO, PerinaStim e opcionais para o equipamento DualPex 961. Tais equipamentos possuem programas desenvolvidos especialmente para o tratamento uroginecológico.

Recomenda-se portanto, o uso dos eletrodos somente com os equipamentos mencionados.

### **ATENÇÃO**


A QUARK Produtos Médicos não se responsabiliza pelo uso indevido, bem como qualquer alteração e/ou adaptação feita no eletrodo para ser usado em outro equipamento.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Medidas (Cx D):

Eletrodo Vaginal - Comprimento 19 cm x Diâmetro 2 cm

Eletrodo Anal - Comprimento 11 cm x Diâmetro 1,4cm

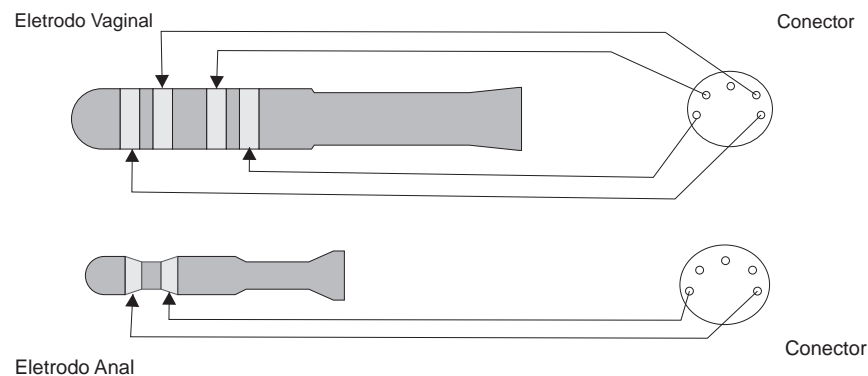

04

Eletrodo Uroginecológico QUARK

## LIMPEZA

Recomenda-se antes e após cada utilização a lavagem do eletrodo com sabonete anti-séptico. Após lavagem, deve ser realizado um esfregaço com uma gaze umedecida com álcool 70% em todo o cabo do eletrodo.

**IMPORTANTE:** No momento da limpeza, deve-se **desconectar** o eletrodo do equipamento. Produto não esterilizado. Nunca use auto clave.

## INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Para a utilização dos Eletrodos é necessário que seja aplicado um gel lubrificante antes da introdução no paciente que não deve exceder o ponto especificado no desenho da página seguinte.

Eletrodo Uroginecológico QUARK

05