

Nem sempre é preciso chamar o técnico

A ASSISTÊNCIA TÉCNICA QUARK está sempre pronta para atendê-lo, caso seu produto necessite de ajustes ou reparos. Entretanto, mesmo que o produto esteja na garantia, antes de chamar um técnico, verifique se o problema não é simples de resolver. Você evitará perda de tempo e a remoção desnecessária do produto.

Dica:

- Verifique se as instruções de instalação e uso foram seguidas corretamente.

Assistência técnica autorizada

Quark Produtos Médicos
Rua do Rosário, 1776 - Centro
CEP 13.400-186 - Piracicaba SP
Fone/Fax: (19) 3302-8090
E-mail: ass-tec@quarkmedical.com.br

Responsável Técnico

André Luis Toledo Mendes
CREA 0681928313

Referência Bibliográfica

1. HALL, Carrie M. ; BRODY, Lori Thein. *Exercício Terapêutico* - Na Busca da Função. Rio de Janeiro: Editora Guanabara Koogan, 2001.

Observações:

- As partes e acessórios aprovados para a utilização são os que acompanham o produto. A QUARK não se responsabiliza pela utilização de outras partes e acessórios, bem como não garante a qualidade dos mesmos.

- Devido a melhoria contínua de nossos produtos, a QUARK se reserva ao direito de alterar seus produtos sem incorrer em obrigação alguma de aviso prévio ou atualização em produtos já fabricados.

Manual de Operação
Versão 1.2



Mini Cama Elástica

**(Conforme codificação ANVISA:
Aparelho para Fisioterapia)**

Registro ANVISA nº 80079190015

Fabricante:

QUARK®
Produtos Médicos | Medical Products

Razão Social: André Luis de Toledo Mendes
CNPJ 71.769.673/0001-59 . Indústria Brasileira
Rua do Rosário, 1776 . Piracicaba.SP . CEP 13.400-186
Fone (19) 2105.2800 . quark@quarkmedical.com.br

Parabéns!

Você acaba de adquirir mais um produto com a tecnologia QUARK que não tem medido esforços para produzir produtos de mecanoterapia, dentro dos rigorosos padrões de qualidade. A Mini Cama Elástica foi concebida para fornecer ao profissional da área de Fisioterapia máxima confiabilidade e facilidade de utilização.

O fator mais importante no tratamento das deficiências de equilíbrio consiste em determinar sua causa. Muitos indivíduos carecem de força “central”, ou força no tronco e na pelve, que proporciona uma base estável para o movimento subsequente. Um programa concomitante de força é necessário, com frequência, para tratar as deficiências do equilíbrio¹.

Podem ser usadas várias modalidades para tratar as deficiências do equilíbrio¹.

Uma modalidade é a Mini Cama Elástica que é indicada como apoio para a realização de treino de equilíbrio e também o fortalecimento (exercícios) de membros inferiores.

Indicação

Indicado como apoio para a realização de treino de equilíbrio e fortalecimento dinâmico de membros inferiores.

Instruções para Instalação e Uso

1. Posicionar a Mini Cama Elástica em local plano;
2. Posicionar o indivíduo sobre a Mini Cama Elástica;
3. Aplicar o treino ou exercícios para fortalecimento.



Recomendações de Segurança

Este produto foi projetado e produzido dentro das mais rigorosas normas de qualidade. Para usufruir melhor e obter melhor funcionamento do produto, siga estas recomendações:

Utilização

A utilização da Mini Cama Elástica deverá ser feita sob orientação do Fisioterapeuta ou por profissional treinado.

Limpeza

Utilize apenas um pano umedecido com água para limpeza.

Armazenamento e Conservação

Nos casos em que a Mini Cama Elástica não seja utilizada por um período mais longo, procure armazená-la em local seco.

Acessórios

A Mini Cama Elástica vem acompanhada por este manual de utilização. Este acessório é de uso exclusivo da Mini Cama Elástica.

Características Técnicas

Armação metálica em estrutura de ferro com pintura eletrostática.

Lona dupla face com ilhoes, presa por elásticos de alta resistência.

Comprimento: 50 cm

Largura: 40 cm

Altura: 20 cm

Capacidade: 120 kg