

Manual de Operação

Versão 1.2



BARRA DE LING

(Conforme codificação ANVISA:
Aparelho para Fisioterapia)

Registro ANVISA nº 80079190014

Fabricante:

QUARK Produtos Médicos

Razão Social: André Luis de Toledo Mendes

CNPJ 71.769.673/0001-59

Indústria Brasileira

Rua do Rosário, 1776 Piracicaba - SP CEP 13 400 186

E-mail: quark@quarkmedical.com.br FONE (19) 2105-2800

Índice

Introdução.....	03
Indicação.....	03
Instruções para Instalação e Uso.....	04
Recomendações e Precauções de Segurança.....	05
Características Técnicas.....	05
Nem sempre é preciso chamar o técnico.....	06
Assistência Técnica Autorizada.....	06

Introdução

Parabéns!

Você acaba de adquirir mais um produto com a tecnologia QUARK.

A QUARK não tem medido esforços para produzir produtos de mecanoterapia, dentro dos rigorosos padrões de qualidade.

A Barra de Ling foi concebida para fornecer ao profissional da área de Fisioterapia máxima confiabilidade e facilidade de utilização.

A Barra de Ling é um apoio para a realização de exercícios posturais e de alongamento.

Indicação

É indicada como apoio para a realização de exercícios posturais e de alongamento.

Instruções para Instalação e Uso

Instalação

- 1- Selecionar uma parede sem irregularidades;
- 2- Fixar através dos parafusos acompanhantes a Barra de Ling na parede, com uma distância de aproximadamente 10 cm do chão;

Uso

- 1- Posicionar o indivíduo;
- 2- Iniciar os exercícios



Recomendações e Precauções de Segurança

Este produto foi projetado e produzido dentro das mais rigorosas normas de qualidade. Para usufruir melhor e obter melhor funcionamento do produto, siga estas recomendações:

Utilização

A utilização da Barra de Ling deverá ser feita sob orientação do Fisioterapeuta ou por profissional treinado. Antes da utilização deverá ser verificado se a Barra está bem fixada na parede.

Limpeza

Utilize apenas um pano umedecido com água para limpeza.

Armazenamento e Conservação

Nos casos em que a Barra de Ling não seja utilizada por um período mais longo, procure armazená-la em local seco.

Acessórios

A Barra de Ling vem acompanhada por este manual de utilização. Este acessório é de uso exclusivo da Barra de Ling. As partes e acessórios aprovados para a utilização são os que acompanham o produto. A QUARK não se responsabiliza pela utilização de outras partes e acessórios, bem como não garante a qualidade dos mesmos.

Características Técnicas

- Estrutura de madeira envernizada;
- Possui dez barras (degraus) de madeira envernizada;
- Acompanham 04 parafusos de madeira de 5,5 x 75 mm e 04 buchas S10 para fixação;
- Comprimento: 2,3 m;
- Largura: 73 cm;
- Distância entre os degraus: 21 cm;
- Capacidade: 120 kg.

Nem sempre é preciso chamar o técnico

A ASSISTÊNCIA TÉCNICA QUARK está sempre pronta para atendê-lo, caso seu produto necessite de ajustes ou reparos. Entretanto, mesmo que o produto esteja na garantia, antes de chamar um técnico, verifique se o problema não é simples de resolver. Você evitará perda de tempo e a remoção desnecessária do produto.

Dica:

- Verifique se a Barra de Ling está fixada corretamente na parede;

Assistência técnica autorizada

Quark Produtos Médicos
Rua do Rosário, 1776 - Centro
Cep 13.400-186 - Piracicaba SP
Fone/Fax: (19) 3302-8090
E-mail: ass-tec@quarkmedical.com.br

SAQ - Serviço de Atendimento QUARK

Prezado Cliente em caso de dúvidas, sugestões ou críticas, ligue para nosso SAQ - Serviço de Atendimento QUARK - Fone: (19) 2105-2800 teremos imenso prazer em receber sua ligação.

Responsável Técnico

André L. T. Mendes
Crea 0681928313

Observação: Devido a melhoria contínua de nossos produtos, a QUARK se reserva ao direito de alterar seus aparelhos sem incorrer em obrigação alguma de aviso prévio ou instalação em aparelhos já fabricados.