

MANUAL DE OPERAÇÃO V2.08



*Imagens meramente ilustrativas

Kit Perina de Propriocepção

Fabricante: Quark Produtos Médicos

Razão Social: Mendes e Barbosa Produtos Médicos

Indústria Brasileira - CNPJ: 71.769.673/0001-59

Rua do Rosário, 1776 - Centro - Piracicaba/SP

CEP: 13.400-186 | Fone: (19) 2105-2800

www.quarkmedical.com.br // quark@quarkmedical.com.br

Kit Perina de Propriocepção

INTRODUÇÃO

O Kit Perina de Propriocepção tem o propósito de melhorar a consciência da contração muscular perineal. Sua aplicabilidade leva ao aprendizado e aperfeiçoamento.

As sondas de pressão para tratamento uroginecológico foram desenvolvidas dentro de rigorosos padrões de qualidade tendo em vista, também, a preocupação em proporcionar ao paciente o mínimo de desconforto com o máximo de eficácia no tratamento.

RECOMENDAÇÕES

A Quark Produtos Médicos não se responsabiliza pelo uso indevido, bem como qualquer alteração e/ou adaptação feita na sonda para ser usada em outro equipamento.

NOTA: é importante lembrar que o Kit Perina de Propriocepção não distingue as contrações dos músculos do períneo e do músculo abdominal.

Kit Perina de Propriocepção

INDICAÇÕES

Ele é utilizado pelo despertar proprioceptivo dos músculos da bacia pélvica, pelo refortalecimento muscular, pelo aprendizado de força de retenção voluntária e de contração perineal antes do esforço e para tratamento de estenose vaginal.

O Kit Perina de Propriocepção propicia ao paciente conscientização da contração muscular perineal. Sua aplicabilidade leva ao aprendizado e aperfeiçoamento.

Trabalha fibras tônicas com tempo de repouso igual ao tempo de trabalho, e as fibras fásicas tendo um tempo de repouso duas a três vezes maior que o tempo de trabalho.

CONTRA-INDICAÇÕES

São causas de contra-indicações os prolapso grau II para III e grau III.

02 Kit Perina de Propriocepção

03

LIMPEZA


Após utilização, retirar e jogar o preservativo, depois lavar a sonda com sabonete anti-séptico.

A mangueira deve ser limpa com álcool 70% em uma gase umedecida.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Sonda de Pressão Anal/Vaginal

Pode haver variações de ± 10 mm no comprimento da sonda.

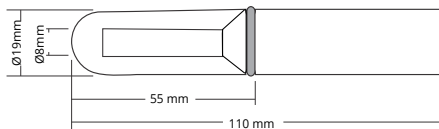

IMPORTANTE: Devido a melhoria contínua de nossos produtos, a QUARK se reserva ao direito de alterar seus produtos (cor, formato, etc.) sem aviso prévio, tampouco atualizar produtos já fabricados.

Kit Perina de Propriocepção

04 Kit Perina de Propriocepção

INSTRUÇÕES PARA UTILIZAÇÃO

Deve ser utilizado lubrificante na introdução. Recomenda-se o uso de Gel Lubrificante Certificado. **Atenção:** Antes de cada utilização, verifique se a sonda está apta para uso.

- Acople a sonda na mangueira do insuflador.
- Aperte a pêra apenas uma vez deixando a sonda "rígida", sendo o formato recomendado para introdução.
- Se a sonda for demasiadamente inflada, como nas fotos 01 e 02, a mesma apresentará deformidades. Deve-se, então, esvaziar a sonda e repetir o processo de inflar.
- Insira a sonda no paciente;
- Utilizando a pera, infle lentamente a sonda, até que o paciente sinta o contato contra a parede vaginal, é importante uma ligeira distensão desta parede;
- Realize a cinesioterapia;
- Ao final da terapia, esvazie a sonda antes de retirá-la.

IMPORTANTE: A Sonda deve ser inflada de maneira que fique rígida para ter contato com a parede anal/vaginal. Se for muito inflada, ela vai se deformar.

05 Kit Perina de Propriocepção


ATENÇÃO: Antes da aplicação, a sonda deve, obrigatoriamente, ser recoberta por um preservativo sem lubrificação, permitindo respeitar o controle da assepsia e evitar contaminação de um paciente para outro.

Somente depois da sonda estar recoberta pelo preservativo é que se deve utilizar um lubrificante (externo), de preferência o gel lubrificante, para efetuar a introdução.

A sonda deve ser inserida no paciente com o mesmo na posição decúbito lateral (direito ou esquerdo). A sonda deve ser introduzida no paciente no máximo até os anéis de borracha.

* Não é indicada a utilização da sonda em pacientes que possuam piercing genital feminino.

Pequenas deformações são toleráveis, pois a mesma se adapta a parede anal/vaginal.

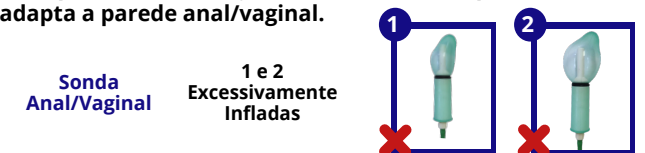

06